

Inserto de Paquete para Kit de Uso Personal

Lea cuidadosamente todas las instrucciones del inserto del paquete antes de la recolección de la muestra.


Los resultados de la prueba pueden ser inválidos si no se efectúa apropiadamente.

Depósito de la Muestra


1. Coloque el papel de recolección incluido dentro de la taza del excusado encima del agua.
2. Deposite la muestra de deposición encima del papel de recolección.
3. Recoja la muestra de deposición antes que el papel se hunda y la muestra toque el agua.
4. Accione el excusado. El papel de recolección es biodegradable y no daña los sistemas sépticos.

Recolección de Muestra

1. Llene toda la información requerida en el frasco de la muestra.

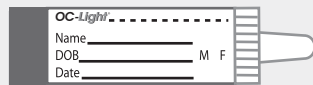

Abra la tapa verde girándola y levantándola.

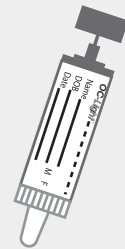

2. Raspe la superficie de la muestra fecal con la sonda para muestras.



Cubra completamente la porción acanalada de la sonda para muestras.



3. Cierre el frasco de la muestra insertando la sonda para muestras y cierre bien la tapa verde. No la vuelva a abrir.



Devuelva el frasco de la muestra a su doctor o al laboratorio en el sobre incluido. Por favor no envíe la muestra a Polymedco.

